

MANUÁL

RESUSCITAČNÁ FIGURÍNA NA CPR

2.2.3.24.

RESUSCITAČNÁ FIGURÍNA NA CPR

POUŽITIE

Resuscitačná figurína na CPR

Pomôcka pre výučbu a zdokonaľovanie praktických skúseností s oživovaním. Figurína určená k nácviku a precvičovaniu kardiopulmonálnej resuscitácie – CPR-XC 406 – s funkciou vyhodnocovania postupu resuscitácie prostredníctvom softvéru na počítači. Súčasťou balenia dodávaného v prenosnom kufri je samotný resuscitačný model, inštalačné CD s manuálom v slovenskom jazyku, napájací kábel resuscitačného modelu a prepojovací USB kábel zabezpečujúci komunikáciu riadiacej jednotky modelu so softvérom v počítači.

K správne fungovaniu modelu a programu určenému k jeho obsluhu je potrebné vykonať nasledujúcich 5 krokov:

1. Vložte priložené inštalačné CD do CD/DVD mechaniky počítača, ktorý budete používať k obsluhu resuscitačného modelu.
2. Vytvorte si vo Vašom počítači na pevnom disku adresár s názvom „RESUSCITAČNÝ MODEL“ a **skopírujte doň celý obsah** priloženého inštalačného CD. Program zatiaľ nespúšťajte.
3. Vyberte z kufra resuscitačný model a uložte ho na chrbát na pevnú podložku tak, aby ste zabránili jeho pádu, alebo prevrhnutiu.
4. Vyberte z kufra napájací kábel resuscitačného modelu a prepojovací USB kábel.
5. Zapojte napájací kábel do príslušného otvoru vo figuríne v pravej bočnej strane v oblasti tesne pod hrudníkom a opačný koniec s adaptérom do zásuvky elektrickej siete s napätím 230V.
6. Zapojte prepojovací USB kábel do otvoru vo figuríne v pravej bočnej strane v oblasti tesne pod hrudníkom a opačný koniec do voľného USB portu Vášho počítača.

Pozn. v prípade, že dĺžka priloženého prepojovacieho USB kábla nie je dostatočná, môžete použiť jeho predĺženie, alebo iný USB kábel s maximálnou dĺžkou 2 metre.

7. Spustíte program – START - k obsluhu resuscitačného modelu, ktorý nájdete vo Vami vytvorenom adresári s názvom „RESUSCITAČNÝ MODEL“. Všetky bližšie informácie k obsluhu a funkciám resuscitačného modelu CPR –XC406 nájdete v priloženom manuáli v tom istom adresári, alebo po kliknutí na funkciu „Pomoc“ v spustenom programe.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE UČEBNEJ POMÔCKY

Tovar je určený výhradne na použitie ako demonštračná učebná pomôcka a neslúži na iný účel! Pred tým, ako začnete tovar používať si starostlivo prečítajte a dodržujte všetky bezpečnostné pokyny a to ako na prístrojových štítkoch tak i v priložených príručkách.

Výrobok nikdy nepoužívajte ani neskladujte v tesnej blízkosti tepelných zdrojov, akými sú napríklad radiátory, bojler, kachle ani v blízkosti ďalších prístrojov a zariadení, ktoré generujú teplo. Výrobky, ktoré na to nie sú výlučne určené, nikdy nepoužívajte v tesnej blízkosti vody (blízko vane, kuchynského drezu, vo vlhkom prostredí, pri bazénoch alebo v daždi). Výrobky nikdy neumiestňujte na nestabilnú podložku – zabránite tým poškodeniu výrobku a úrazu osôb. Vo všeobecnosti nevystavujte tovar mechanickému a chemickému namáhaniu, ktoré by spôsobilo jeho poškodenie / pády, nárazy, poleptanie, poškodenie povrchu.

Všetky príručky a bezpečnostné pokyny uložte na vhodnom mieste pre neskoršie použitie. Výrobok obsahuje malé časti. Je nevhodný pre deti do 3 rokov. Niektoré časti majú ostré hrany a môžu spôsobiť poranenia. Pri práci používajte ochranné pracovné pomôcky, ktoré nie sú súčasťou balenia.

V prípade súčastí zo skla alebo plexiskla pristupuje k manipulácií opatrne, hrozí možnosť poranenia. V prípade balenia do ochranej fólie ju po odstránení znehodnoťte a uchovajte mimo dosahu malých detí aby ste predišli prípadnému uduseniu.

V prípade zariadení napájaných elektrickým prúdom výrobok pripájajte len k napájaciemu zdroju s parametrami popísanými na štítku prístroja a uistite sa, že parametre napájacieho zdroja sú v súlade s požadovanými parametrami pre toto zariadenie.

K čisteniu používajte len vlhkú handričku. K čisteniu výrobkov nikdy nepoužívajte žiadne varianty tekutých alebo aerosolových čističov alebo organických rozpúšťadiel.

V prípade akéhokoľvek poškodenia el. zariadenia, izolácie, či iného mechanického poškodenia, odpojte prístroj z el. siete a zašlite do servisného strediska. V prípade potreby záručného, resp. pozáručného servisu, kontaktujte dodávateľa. Ako doklad priložte potvrdenú kópiu dodacieho listu, čo je nutná podmienka na uznanie záručnej opravy.

Na tovar sa vzťahuje záruka v zmysle obchodného zákonníka podľa výrobcom stanovených podmienok. Štandardná záruka je 24 mesiacov, pokiaľ nie je deklarované inak. Záručná doba zaniká, ak sa vyskytnú vady spôsobené nevhodnou manipuláciou, prirodzeným opotrebovaním, neodbornou obsluhou, opravami alebo zásahmi osôb, ktoré k tomu nie sú oprávnené.